## Máscara Cirúrgica Tripla

### **Modelo MX01**

Branca com elástico

# MAXICOR®

#### CADASTRO ANVISA 10299800047

#### Composição:

O produto é composto por três camadas, sendo a camada interna 25g/m2 e externa 30g/m2 de tecido não tecido (100% polipropileno), filtro bacteriano 25g/m2 no meio (meltblown), clipe de plástico em PVC envolvido em ferro galvanizado, flexível para o nariz, elástico para as orelhas ou tiras para fixação atrás da cabeça.

#### Indicação do Uso e Finalidade:

Servir de barreira física à propagação de bactérias da cavidade oral do usuário para o ar ambiente, diminuindo a carga bacteriana do ambiente. São utilizadas para proteção durante a realização de procedimentos em geral por profissionais como médicos, veterinários, dentistas, enfermeiras, entre outros, como também na proteção do paciente durante a realização de procedimentos assépticos.

#### Modo de Uso:

Abrir a embalagem, retirar a máscara. O clipe para o nariz deve ficar para cima. A máscara deve cobrir o nariz, a boca e o queixo. Colocar os elásticos atrás das orelhas ou amarrar a fita atrás da cabeça. Colocar as pontas dos dedos na ponta do nariz. Pressionar para dentro à partir da posição central e mova gradualmente para os dois lados. Ao remover a máscara facial, não tocar na parte frontal da máscara. Remover primeiro o elástico da orelha ou desamarrar as fitas. Descartar em local apropriado.

#### Precauções:

Produto de uso único. Reprocessamento proibido. Descarte após o uso em lixo específico.

#### Advertências e Cuidados Especiais:

Não utilizar o produto caso sua embalagem esteja danificada, aberta ou o prazo de validade esteja vencido. Utilizar imediatamente após abrir. Substituir o produto quando contaminado ou danificado.

#### Condições Especiais de Armazenamento, Conservação e Manipulação:


O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em temperatura ambiente, local limpo e sem luz solar direta.



50 unidades por cartucho



**EFB** ≥ 95%

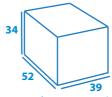

2.000 máscaras por caixa

✓ Uso Único

✓ Sem fibra de vidro ✓ 100% Polipropileno

✓ Hipoalergênica

✓ Atóxica

✓ Não estéril

**√** Sem Latéx

✓ Não inflamável